

App My Invisalign con Invisalign Virtual Care Connesso. Pratico. Sicuro.

Invisalign Virtual Care è una soluzione che ti consente di restare virtualmente in contatto con il tuo Invisalign Provider e ti aiuta a valutare i progressi del trattamento.

Guida introduttiva



01 Scarica l'app My Invisalign

Dopo che il tuo Invisalign Provider ti ha iscritto a Invisalign Virtual Care, riceverai un'e-mail di invito per configurare l'account. Utilizza il link "Get started now" (Inizia subito) per scaricare/aggiornare gratuitamente l'app My Invisalign.


02 Configura l'account paziente Invisalign




Fai clic su "Register" (Registrati) e leggi le Condizioni contrattuali.




Conferma di essere un paziente esistente selezionando "yes" (sì) e scansiona il codice QR sulla bustina degli aligner o inserisci i dettagli paziente manualmente.

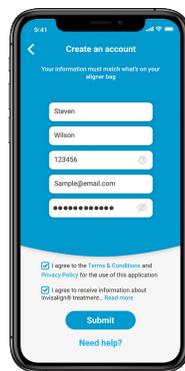

Inserisci le informazioni sull'account e crea un PIN.

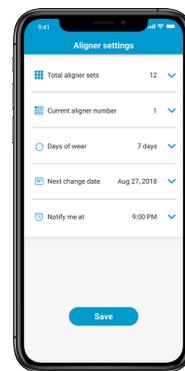

Scegli le impostazioni relative agli aligner e ai promemoria.

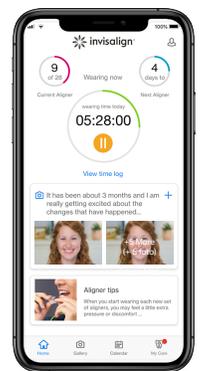


Utilizza il tuo account paziente My Invisalign e l'app per scattare foto a ogni cambio di aligner.

03 È buona norma abilitare le notifiche per l'app My Invisalign, in modo da non perdere nessun promemoria quando è necessario cambiare aligner o inviare foto.

+ Hai già un account My Invisalign?

Se hai già un account My Invisalign, segui la procedura illustrata di seguito per aggiungere Invisalign Virtual Care.

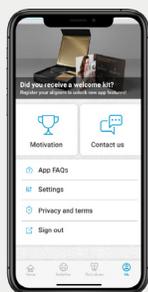


Effettua l'accesso. Tocca l'immagine del kit di benvenuto nella sezione "Me" (Io).



Inserisci nome, cognome e ID Invisalign.



Scansiona il codice QR sulla bustina degli aligner o immetti i dettagli paziente manualmente.

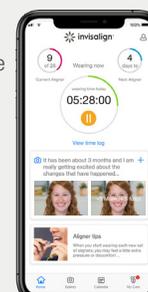


Utilizza il tuo account paziente My Invisalign e l'app per scattare foto a ogni cambio di aligner.

La tua esperienza Invisalign Virtual Care

+ A ogni cambio di aligner, invierai al tuo medico 9 foto.



Riceverai un promemoria quando è il momento di inviare le foto sui progressi del trattamento e passare all'aligner successivo.

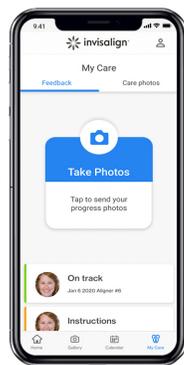

Al momento del cambio dell'aligner, avvia la procedura guidata di acquisizione delle foto nell'app facendo clic sull'opzione di menu My Care nella parte inferiore della home page. Quindi fai clic sul comando "Take Photos" (Scatta foto) di colore blu.




Con l'apribocca inserito, scatterai 3 foto (una guardando avanti, una guardando verso destra e una guardando verso sinistra) per ciascuna delle seguenti condizioni:

- Aligner indossati e morso aperto
- Aligner non indossati e morso aperto
- Aligner non indossati e morso chiuso

+ Il medico ti fornirà un apribocca per aiutarti ad acquisire immagini chiare dei denti.

- Un apribocca specificatamente progettato per aiutare ad acquisire immagini chiare dei denti, necessarie al medico per valutare i progressi del trattamento. Questo apribocca è semplice da utilizzare, comodo da indossare e facile da pulire
- Un pratico astuccio per la conservazione
- Istruzioni facili da seguire su come scaricare l'app My Invisalign e come utilizzare l'apribocca per scattare le foto

+ Inserisci l'apribocca e tocca ogni foto per avviare la procedura di acquisizione delle foto.

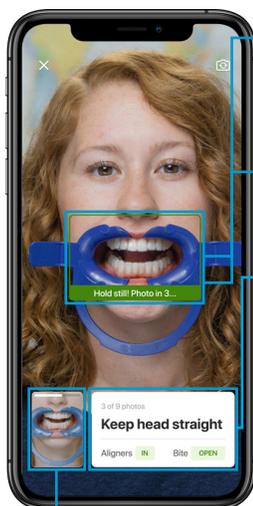


+ Cornice. Una volta confermata la foto da scattare, dovresti iniziare allineando la bocca con il rettangolo nero al centro dello schermo.

+ Acquisizione automatica della foto. Quando la foto è allineata secondo necessità, la cornice diventa verde e inizia il conto alla rovescia da 3 fino a quando non viene scattata la foto.

+ Guida fotografica. Quando si scatta una foto, viene visualizzata una casella di testo bianca contenente le seguenti informazioni:

- Avanzamento foto: quante foto sono state completate e quante ne rimangono
- Posizione della testa nella foto: il modo in cui dovresti posizionare la testa
- Posizione di aligner e morso: se l'aligner deve essere indossato o meno e se il morso deve essere aperto o chiuso

+ Guida video. Puoi visualizzare un video che mostra le posizioni della testa e della fotocamera necessarie per scattare ciascuna foto facendo clic sull'immagine in miniatura accanto alla guida fotografica.

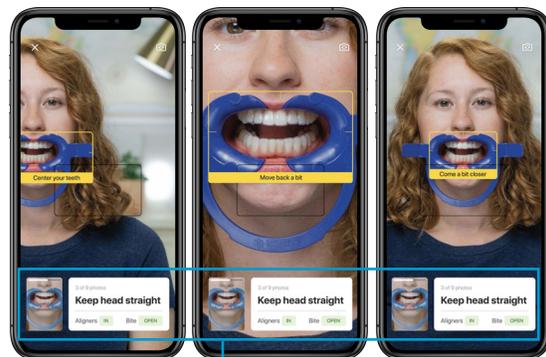

+ Feedback dinamico per l'acquisizione delle foto. Viene visualizzata una cornice gialla con istruzioni dinamiche su come regolare la foto per ottenere l'immagine necessaria.




+ Invio di foto e commenti. Quando tutte e 9 le foto sono state scattate, puoi aggiungere commenti o domande prima di inviarle al tuo medico.

Ricezione del feedback

Dopo aver esaminato le foto che gli hai inviato, il medico ti fornirà uno dei seguenti feedback: "In linea" o "Istruzioni". Per ulteriori informazioni, vedi più avanti.

+ In linea


Ottimo lavoro. Il medico ti informa che il percorso per ottenere il tuo nuovo sorriso è in linea con il piano di trattamento personalizzato. Continua a indossare gli aligner come stabilito.

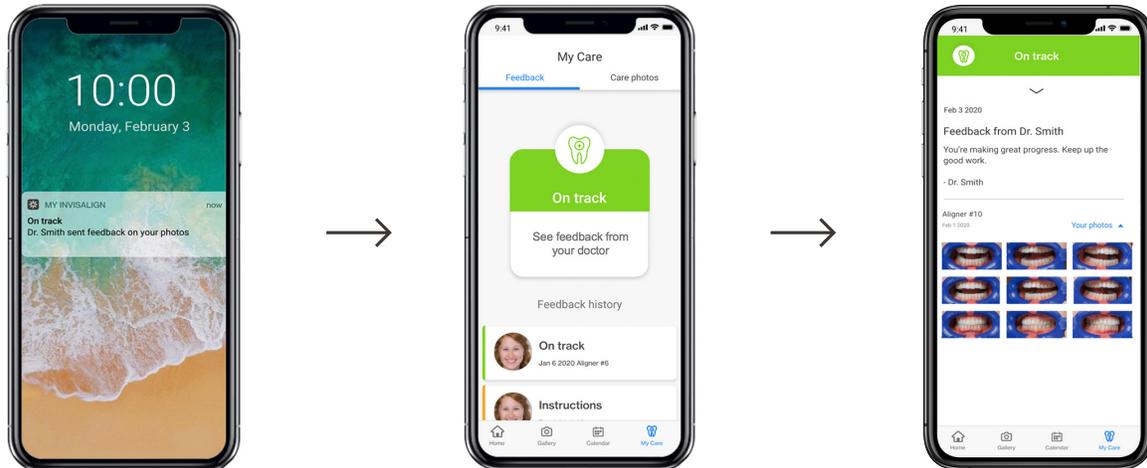

+ Istruzioni

Il medico può fornirti ulteriori indicazioni, ad esempio indossare l'aligner che stai utilizzando per più tempo o utilizzare chewie. Segui sempre le indicazioni del medico per essere in linea con il piano per il nuovo sorriso.

Occasionalmente il medico potrebbe aver bisogno di apportare correzioni al trattamento, come modifiche relative alla fase di aligner o al tempo di utilizzo. Tali modifiche possono essere programmate automaticamente nell'app My Invisalign. Tocca semplicemente "Accept settings update" (Accetta aggiornamento impostazioni) per continuare a ricevere notifiche per il nuovo programma di cambi di aligner.

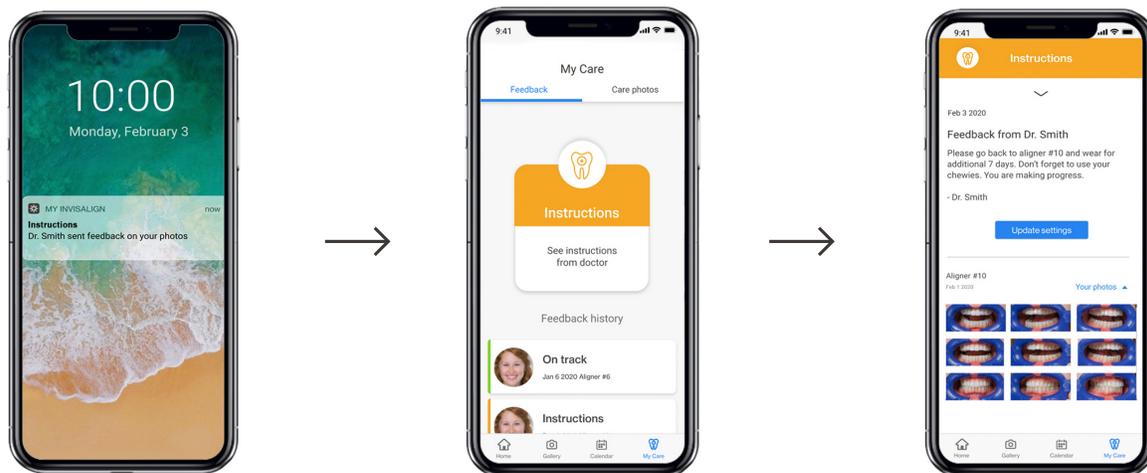

Il tuo medico potrebbe chiederti di fissare un appuntamento virtuale. In tal caso, riceverai un'e-mail con un link per scaricare l'app Zoom Meetings e uno per partecipare alla riunione all'ora pianificata.

+ In determinate situazioni, il tuo medico potrebbe voler pianificare una visita presso lo studio

Non dimenticare di esplorare l'app My Invisalign.

 Prova il timer di utilizzo per monitorare il tempo di utilizzo dell'aligner e tenere informato il medico.

 Usa il calendario delle visite per sapere quando sono previsti i prossimi appuntamenti.

 Visualizza e condividi le foto dei tuoi progressi con amici e parenti.

 Ottieni assistenza per l'app nel profilo in "My Feedback/rating" (Il mio feedback/valutazione). Utilizza il modulo per inviare le domande.